


Pettrust 量測操作 SOP

操作圖示



圖一

圖二

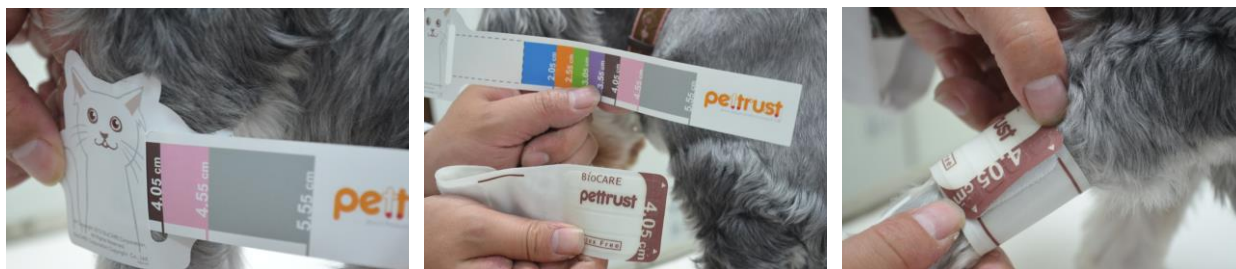

圖三

圖四

圖五



圖六

圖七

圖八

操作步驟

1. 選擇適當的量測位置與姿勢，姿勢優先順序為趴姿>坐姿>立姿。(圖一)
2. 試著找到血管的位置。(圖二)
3. 使用量尺確認量測部位尺寸。(圖三)
4. 選擇該尺寸顏色對應的 Cuff。(圖四)
5. 綁上 Cuff 時，末端箭頭處須對應在 Cuff 上的線條範圍。(圖五)
6. Cuff 的氣囊位置要對應血管位置，並在量測過程中隨時注意 Cuff 是否滑落。(圖六)
7. 接上 Air tube 後旋轉 15 度確認連結確實。(圖七)
8. 完成以上步驟後按下 Start 即開始量測。(圖八)

<注意> 在量測過程中須盡量讓寵物保持穩定不躁動，以確保量測準確度。

<注意>Air tube 須在開機完成後才能接上 Pettrust