

醫友 吸引器

(雙缸馬達)

PORTABLE SUCTION

Suitable for General medical,
Pediatrics, Clinic, Nursing center,
Home care.



DF-760A



DF-760

CE 0434



ISO 9001 ISO 13485

衛署醫器製字第001475號



DOCTOR'S FRIEND medical instrument co., Ltd.

醫友 吸引器【抽痰機】

DOCTOR'S FRIEND SUCTION PUMP

DF-760

型號：DF-760A

衛署醫器製字第001475號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書，並遵照指示使用。

本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項請參照原廠資料。

產品敘述：本產品動力來源使用-無油式真空幫浦，產生真空負壓的吸力作為抽吸的動力來源，並適用於各大中小型醫院診所，醫療護理、居家照顧、安養中心等等。

適應症(用途說明)：對於因呼吸道症狀得使用抽痰之設備時，使用藉由真空力之大小由吸引導管做抽吸功能。



配備說明

- | | |
|--------------|------------------|
| 1 小型真空計 | 6 1000c.c.瓶蓋(彎) |
| 2 壓力調節鈕 | 7 水位控制(小) |
| 3 ON-OFF電源開關 | 8 1000c.c.吸引瓶 |
| 4 過濾器含前後管 | 9 連接管 |
| 5 過濾器(小) | 10 1000c.c.瓶蓋(直) |

標準附件

- | | |
|------------|-----|
| ● 塑膠管含綠色接頭 | 1 條 |
| ● 吸引導管 | 1 條 |
| ● 過濾器(小) | 2 個 |



- 使用前請將連接管(中間附有一個過濾器)一頭插入真空幫浦吸入孔。另一頭接往瓶蓋上方VACUUM吸入孔。

- 吸引管請插入瓶蓋上方PATIENT吸入孔，管子末端接吸引導管即可使用。



- 雙吸引瓶裝置 (1000c.c. × 2支)，達到容量增加、減少清洗次數的目的。

- 此串聯式裝置，當第一支瓶子水滿時，機器會自動將抽吸物導入第二支瓶子，更方便使用。



- 本過濾器為密封型設計，內部裝有過濾紙，但過濾器一經污染應立即更換，以確保患者使用衛生安全。

規 格	DF-760	DF-760A
輸出馬力	88 W	88 W
真空流量	35 liter/min	35 liter/min
最大吸力	65 cm/hg	65 cm/hg
瓶子容量	1000c.c. × 1支	1000c.c. × 2支
水位控制	浮球式設計	浮球式設計
淨重/毛重	6.3 kgs/7.0 kgs	6.9 kgs/8.0 kgs



90-046

- 本儀器使用雙缸真空幫浦設計。主要結構由鋁合金高溫抗壓塑膠材料粉末冶金，曲軸、凸輪、耐酸鹼合成橡膠等製成。



DOCTOR'S FRIEND

製造廠名稱：益達醫療儀器有限公司
 製造廠地址：台中市潭子區潭秀里中山路3段13巷28號
 藥商名稱：益達醫療儀器有限公司
 藥商地址：台中市潭子區潭秀里中山路3段13巷28號